



Saphenamed

UCV



Venös insufficiens = Ett stort problem

Idag uppskattar man att ungefär 0,2 - 0,6 procent* av befolkningen är drabbad av fot- eller bensår och andelen drabbade stiger med ökad ålder. Den vanligaste orsaken till ett svårläkt bensår är venös insufficiens vilket står för 50% av alla bensår. Venös insufficiens innebär ett försämrat återflöde av blodet från fot och underben till hjärtat beroende på att blodet "stockar sig" i venerna och pumpas inte upp till hjärtat, detta leder till att vätska tränger ut i vävnaden i benen, som gör att svullnad och i vissa fall även sår, så kallade venösa bensår uppstår.

* Informationen är tagen från www.karolinska.se



Kompressionsbehandling

För att uppnå en effektiv behandling är kompression ofta grunden då trycket hjälper till att stimulera vadmuskelpumpens arbete och ökar det venösa flödet samt minskar svullnaden. De flesta kompressionsstrumpor är graderade vilket innebär att vristen får det högsta trycket och sedan minskar det gradvis uppåt. Kompressionsstrumpor används vid venösa sjukdomstillstånd. Det är viktigt att använda strumpan dagligen för att förebygga uppkomsten av nya sår.



Problem under behandling

Tidigare har man ofta upplevt högt tryck på ben och sår som obehagligt. Det har även varit svårt för patienter att ta av och på sina kompressionsstrumpor själva och då speciellt äldre människor som ofta har en nedsatt styrka. Torr och sprucken hud har också varit ett stort problem.

Patienterna upplever ofta användandet av strumporna som negativt.

De vanligaste synpunkterna är:

- Strumporna är svåra att ta av och på
- Man tror att man är botad när såret redan läkt
- Man tror inte den har någon effekt



Den optimala lösningen heter: Saphenamed ucv

Kompressionsstrumpan Saphenamed ucv är ett strumpsystem som består av två strumpor som tillsammans ger ett tryck på 40mmHg, vilket motsvarar kompressionsklass III. För att uppnå bästa resultat bör båda strumporna användas samtidigt.

Understrumpan är en hel strumpa med en glidyta (integrerad påtagningshjälp) vilket gör att överstrumpan enkelt kan tas av och på. Understrumpan kan bäras både dag och natt och ger ett vilotryck på 18mmHg.

När man tar på överstrumpan som har en öppen tå så hakar strumporna i varandra och samverkar till att ge ett vilotryck på 40mmHg. Ankelområdet är tillverkat av ett elastiskt vävt material för att ge patienten rörlighet i foten vilket är en viktig del i kompressionsbehandlingen. För att ge användaren hög komfort fördelas trycket jämnt över benet och endast en svag gradering från ankeln sker. Saphenamed innehåller även SeaCell® vilket gör strumpan hudvänlig och andningsbar.

Strumpan kan med fördel bäras även under varma somardagar eftersom den är temperaturreglad.

Understrumpan

- Integrerad "påtagningshjälp" gör strumpan enkel att ta på
- Materialet i strumpan är temperaturreglerande och innehåller tillsatser av ren SeaCell®, vilket har en vitaliserande effekt på huden
- Trycket är lokaliserat i ankelområdet och sjunker mycket lite proximalt (uppåt)
- Understrumpans fotdel är lite bredare för att undvika tryck på foten
- Förpackningen innehåller 2st understrumpor



Överstrumpan

- När överstrumpan tas på ger systemet ett vilotryck på ca 40 mmHg i området kring ankeln
- Materialen i över- och understrumpan "hakar i" varandra vilket reducerar elasticiteten i strumporna var för sig och ökar arbetstrycket
- Ankelområdet är tillverkat av ett elastiskt vävt material för att inte begränsa fotens rörelse



Ren SeaCell® används som ett tillverkningsmaterial. Denna patenterade textilfiber innehåller algextrakt berikat med olika mineraler, spårämnen, kolhydrater, fett och vitaminer som stödjer hudens läkningsprocess. Mineralsalterna i algerna ger också mineraler till huden. För mer information se. www.seacell.com*

* SeaCell® är ansvarig för informationen på websidan.



helps healing.


HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Mer än 185 år i hälsans tjänst.

Saphenamed ucv kompressionsstrumpa från HARTMANN är bara en av våra många kvalitetsprodukter som gör livet lättare för patienter, läkare och sjuksköterskor.

Utöver det speciella medicinska kompressionsstrumpsystemet, Saphenamed ucv, kan vi också erbjuda ett fullt sortiment av produkter för behandling av venösa problem.

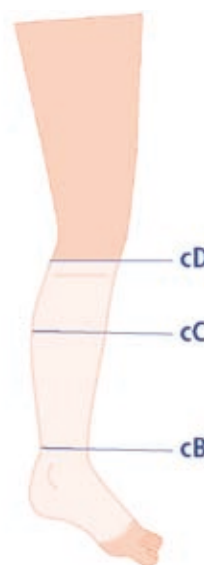

HARTMANN-ScandiCare AB 8811401 (2010-03)

Sortiment

Produkt	Innehåll	cB	cC	cD
Saphenamed ucv stl 1	1 Överstrumpa, 2 understrumpor	19-21	30-35	28-36
Saphenamed ucv stl 2	1 Överstrumpa, 2 understrumpor	21-23	33-38	31-36
Saphenamed ucv stl 3	1 Överstrumpa, 2 understrumpor	23-25	36-41	34-39
Saphenamed ucv stl 4	1 Överstrumpa, 2 understrumpor	25-27	39-44	37-42
Saphenamed ucv stl 5	1 Överstrumpa, 2 understrumpor	27-29	42-47	40-45
Saphenamed ucv stl 6	1 Överstrumpa, 2 understrumpor	29-31	45-50	43-48