



# HydroTac®/HydroTac comfort®

## Hydroaktivt skumförband

HydroTac är ett hydroaktivt skumförband med två olika funktioner. Skumförbandet gör att överflödigt exsudat snabbt och effektivt absorberas upp samtidigt som den hydroaktiva kontaktytan återfuktar såret och ser till att förbandet bibehåller en optimal sårhelingsmiljö. Förbandet används med fördel under granuleringsfasen. Förbandet är enkelt att hantera och kan avlägsnas smärtfritt. Kontaktytan är lätt "självhäftande" och fäster endast på huden, ej på såret.

Hög absorptionskapacitet

Återfuktande kontaktyta

Lätt adhesiv och enkel hantering



### Indikation

För behandling av lätt till måttligt vätskan-  
de sår, såsom bensår, diabetesfotsår och  
trycksår.

### Kontraindikationer:

Inga kända.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45  
E-post [info@hartmann.se](mailto:info@hartmann.se)

Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)

HydroTac är ett hydroaktivt skumförband som snabbt och effektivt absorberar upp exsudat samtidigt som det bibehåller en fuktig sårmiljö. Förbandet är lätt att applicera då det sitter kvar medans man förbereder övriga moment.

### Egenskaper

HydroTac är genomsläpplig för luft, fukt och skyddar mot bakterier. Den hydroaktiva kontaktytan har en nätstruktur vilket gör det möjligt att både absorbera upp exsudat och samtidigt bibehålla en fuktig sårmiljö. Den hydroaktiva gelen motverkar att förbandet fastnar i såret och kan tas bort utan att patienten upplever smärta. HydroTac komfort har en häftkant vilket gör att inga andra förband är nödvändiga.



### Material

Förbandet består av polyuretan och kontaktytan är impregnerad med en hydrogel som består av en blandning polyuretanpolymer som innehåller propylene glycol.

HydroTac komfort har en akrylatbaserad häftmassa som är lågallergen.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass IIb, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
<b>HydroTac®</b>	6 cm rund	685 848	3 st	18 Afp
Steril, enstycksförpackad	6 cm rund	685 849	10 st	6 Afp
	10 x 10 cm	685 831	3 st	12 Afp
	10 x 10 cm	685 832	10 st	6 Afp
	12,5 x 12,5 cm	685 836	3 st	12 Afp
	12,5 x 12,5 cm	685 837	10 st	6 Afp
	15 x 15 cm	685 839	3 st	12 Afp
	10 x 20 cm	685 833	3 st	12 Afp
	15 x 20 cm	685 843	10 st	6 Afp
	20 x 20 cm	685 844	3 st	12 Afp
<b>HydroTac® komfort</b>	8 x 8 cm	685 810	10 st	6 Afp
Steril, enstycksförpackad	12,5 x 12,5 cm	685 814	3 st	12 Afp
	12,5 x 12,5 cm	685 815	10 st	6 Afp
	15 x 20 cm	685 820	3 st	12 Afp
	15 x 20 cm	685 821	10 st	6 Afp
	15 x 15 cm	685 817	10 st	6 Afp
	20 x 20 cm	685 822	3 st	12 Afp
<b>HydroTac® sacral</b>	18 x 18 cm	685 826	3 st	6 Afp
Steril, enstycksförpackad	18 x 18 cm	685 827	10 st	6 Afp
	22 x 22 cm	685 828	3 st	6 Afp

### Fördelar:

Hög absorptionskapacitet

Enkel och hygienisk hantering

Återfuktande kontaktyta

Avlägsnas smärtfritt

Lätt adhesiv