



Hydrofilm®

Transparent sårfilm


Efter ett kirurgiskt ingrepp behöver suturerna skyddas mot yttre kontaminering. Samtidigt ska en optimal läkning komma till stånd och sårinspektion kunna utföras enkelt. Hydrofilm är ett självhäftande transparent filmförband. Hydrofilm ger möjlighet till effektiv sårvård samtidigt som den är hudvänlig och enkel att hantera.

Vattentät och ogenomtränglig för bakterier



Transparent

Andas

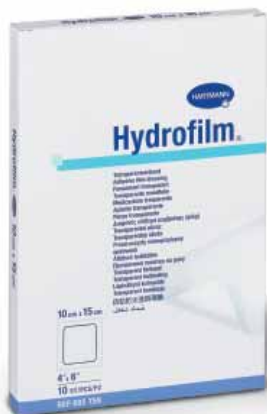

Indikation

Används som postoperativt och primärt förband för att skydda sår som inte vätskar eller som fixering.

T.ex. kateter- och kanylfixeringar, täckförband över geler och kalciumalginater eller som skydd mot mekanisk irritation.

Kontraindikationer:

Hydrofilm ska inte användas på infekterade, blödande eller vätskande sår.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Hydrofilm är ett självhäftande, transparent filmförband. Filmen består av tunn vattentät polyuretan som även står emot bakterier och virus. Förbandet andas och har en häftmassa som är dermatologiskt testad.

Egenskaper

Tack vare den tunna, transparenta filmen kan såret hållas under uppsikt utan att förbandet behöver bytas. Denna egenskap gör att såret inte behöver störas i onödan under läkningsprocessen. Eftersom Hydrofilm stänger ute både vatten och bakterier minimeras risken för sekundärinfektioner. Det fungerar också utmärkt att bära förbandet vid bad och dusch.

Filmen har en matt yta som inte reflekterar ljus, detta gör att filmen inte syns så väl.

Hörnen på Hydrofilm är rundade för att förbandet ska sitta stadigt på plats. Häftmassan i filmförbandet har kraftig häftförmåga för att förbandet ska kunna sitta stadigt under längre tid. Användningstiden avgörs av sårets status och typ.

Filmen har en mycket tydlig fixeringsinstruktion. Genom att följa numreringen från 1-4 så kan förbandet fixeras på ett enkelt sätt. Det går utmärkt att applicera filmförbandet med handskar på.

Material

Polyuretanfilm med hypoallergen häftmassa av akrylat.
Kolofoniumfri.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass IIa, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.



Hydrofilm skyddar suturer och suturtejp mot väta.

Fixeringsinstruktioner

Huden måste vara torr vid fixering.

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
Hydrofilm®	6 x 7 cm	685 755	10 st	20 Afp
Steril, enstycksförpackad	10 x 12,5 cm	685 757	10 st	20 Afp
	10 x 15 cm	685 759	10 st	10 Afp
	15 x 20 cm	685 761	10 st	10 Afp
	20 x 30 cm	685 765	10 st	10 Afp
	10 x 25 cm	685 763	25 st	10 Afp
	12 x 25 cm	685 764	25 st	10 Afp
	10 x 15 cm	685 760	50 st	10 Afp
	15 x 20 cm	685 762	50 st	10 Afp
	6 x 7 cm	685 756	100 st	10 Afp
	10 x 12,5 cm	685 758	100 st	10 Afp

Fördelar:

Säkert sårskydd

Enkel hantering

Finns i 7 storlekar

Kolofoniumfri

Dermatologiskt testad

Transparent