

# Hydrotul<sup>®</sup>

## Absorberande salvkompres

Hydrotul är ett sårförband där man kombinerat fördelarna av en salvkompres och modern hydroaktiv teknologi. Salvmassan håller sårkanterna mjuka och smidiga samtidigt som de hydrocolloida partiklarna upprätthåller en fuktig sårmiljö som påskyndar sårhäkningen. Hydrotul är lika enkel att använda som en vanlig salvkompres och kan kombineras med alla vanliga absorptionsförband.

Kan kombineras med alla typer  
av absorptionsförband



Enkel hantering

Många användningsområden



### Indikation

För alla ytliga, akuta och kroniska sår.  
Det sekundära absorptionsförbandet väljs  
efter mängd exsudat i såret.

#### **Kontraindikationer:**

Inga kända. Dock bör förbandet inte användas på infekterade sår om sekundärförbandet inte är semipermeabelt.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45  
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)

Hydrotul är en salvkompress med hydrocolloider. I förening med sårexsudat bildar salvmassan en gel som skapar en optimal läkningsmiljö för såret.

### Egenskaper

Hydrotul håller sårkanterna mjuka och smidiga samtidigt som det förhindrar maceration.

Hydrotul har en vaxkakiliknande struktur som underlättar för exsudat att tränga igenom till det sekundära absorptionsförbandet. Salvmassan i Hydrotul innehåller hydrocolloida partiklar som absorberar exsudat och skapar en fuktig sårmiljö.

Hydrotul kan ligga på såret i flera dagar och ger på så sätt såret en chans att "vila" och påskyndar sårhäkningen.

Smärtfria förbandsbyten möjliggörs genom att Hydrotul inte fastnar i såret. Hydrotul kan användas till många indikationer, såväl akuta som kroniska ytliga sår. Förbandet fastnar inte i handskar och kan klippas med en steril sax för att passa olika sårformer. Hydrotul är enkel att hantera och är ekonomiskt fördelaktigt i jämförelse med andra hydroaktiva produkter på grund av möjligheten till lång användningstid.


### Material

Väv av polyamid, impregnerad med en salvmassa utan verk samma ämnen. Salvan innehåller: Vaseline, Caprylic/Capric/Myristic/ Stearic Triglycerider, Cellulosa Gummi (Natriumcarboxy-methyl-cellulosa), Bis-diglyceryl Polyacryladipat-2, Isostearyl Diglyceryl Succinate, Glyceryl Stearat, Hydrogenated Coco Glycerydesa (analog INCI).

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass IIb, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EWG.



Applicering av Hydrotul på tagställe.

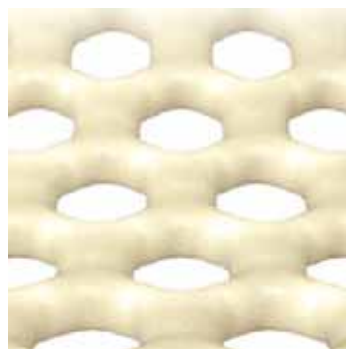

Den vaxkakiliknande nätstrukturen i Hydrotul.

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
<b>Hydrotul.</b>	5 x 5 cm	499 581	10 st	12 Afp
Steril, enstycksförpackad	10 x 12 cm	499 583	10 st	12 Afp
	15 x 20 cm	499 584	10 st	6 Afp

### Fördelar:

Många användningsområden

Enkel hantering

Skyddar sårkanterna

Ekonomisk

Smärtfria förbandsbyten