

Lastodur® strong

Högelastisk kompressionsbinda

Lastodur strong är en permanentelastisk långsträckt binda med en elasticitet på 180%. Sträckningen kan varieras för att kontrollera kompressionen. Binda är luftgenomsläpplig och hudvänlig. Lastodur strong har en kraftig vävstruktur.

För kraftig kompression

Kan tvättas



Bekväm att bära



Indikation

För profylax och ödembehandling t.ex. vid venös insufficiens. Vid trombosbehandling. Som stöd och avlastning vid muskel- och skelettskador och som sportbandage.

Kontraindikationer:

Arteriell ocklusionssjukdom.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Lastodur strong är en hög elastisk kompressionsbinda med vävd kant. Avsedd för kraftig kompression/stöd och ger kontrollerad kompression med hög komfort. Lämplig för rörliga personer.

Egenskaper

Bindan består av en hög andel naturfiber och är mycket hudvänlig. Genomsläpplig för luft. Lastodur strong har en stadig kvalitet och är hållbar även vid påfrestningar. Normalt tas bindan av under natten och lindas på igen på morgonen.

Material

85% bomull, 7% polyamid, 8% elasthan.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Utsträckt längd: 7 m

Outsträckt längd: ca 2,5 m

Elasticitet: 180%

Tvättråd

Lastodur strong kan tvättas i 60°C och steriliseras i autoklav vid 134°C.



Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
Lastodur strong	7 m x 6 cm	931 631	10 st	20 Afp
Lösa i ask	7 m x 8 cm	931 632	10 st	18 Afp
	7 m x 10 cm	931 633	10 st	12 Afp
	7 m x 12 cm	931 634	10 st	10 Afp
Styckförpackade i ask	7 m x 6 cm	931 663	1 st	60 Afp
	7 m x 8 cm	931 664	1 st	60 Afp
	7 m x 10 cm	931 665	1 st	60 Afp
	7 m x 12 cm	931 666	1 st	30 Afp



Här används Lastodur strong som sportbandage.

Fixeringsinstruktion

Använd inte förbandsklämman runt produkten för att fixera bindan på en patient, den finns bara med i förpackningen för att hålla ihop bindan under transporten. Fixera istället med någon form av tejp t.ex. Omniplast.

Fördelar:

Bekväm att bära

Tvättbar

Många användningsområden

Släpper igenom luft

Latexfri