



# Peha-crepp® E

## Högelastisk fixeringsbinda

För förbandsfixering över leder, koniska och runda kroppsdelar krävs en binda som är elastisk och formbar. Peha-crepp E uppfyller dessa kriterier och fixerar enkelt förband där andra bindor inte fungerar.

Peha-crepp E har en elasticitet på över 160%



Fungerar för alla typer av fixering

Kan kokas och steriliseras



### Indikation

Till alla typer av förbandsfixering särskilt över leder och koniska eller runda kroppsdelar.

**Kontraindikationer:**

Inga kända.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45  
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)

Peha-crepp E är en högelastisk fixerande binda som är mycket luftig genom sin glesa vävstruktur.

### Egenskaper

Peha-crepp E kan appliceras snabbt och enkelt. Peha-crepp E glider inte ner på grund av sin struktur. Den krusade väven gör att den sitter fast ordentligt även över tid. Bindan bibehåller också sin elasticitet. Strukturen i Peha-crepp E ger en låg materialförbrukning eftersom endast ett fåtal lindningsturer behövs för en säker fixering. Orsakar inte stasning och ger full frihet i rörelse.

### Material

63% viskos, 37% polyamid. Vit.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Utsträckt längd: 4 m

Outsträckt längd: ca 1,5 m

Elasticitet: 160%

### Tvättråd

Peha-crepp E kan steriliseras i autoklav vid 134°C i 15 minuter eller 121°C i 20 minuter och tvättas i 95°C ett fåtal gånger.



Peha-crepp E applicerad som förbandsfixering.

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
<b>Peha-crepp E</b>	4 m x 4 cm	303 110	20 st	8 Afp
Lösa i förpackning	4 m x 6 cm	303 111	20 st	10 Afp
	4 m x 8 cm	303 112	20 st	10 Afp
	4 m x 10 cm	303 113	20 st	6 Afp
	4 m x 12 cm	303 114	20 st	4 Afp

### Fördelar:

Bekväm att bära

Högelastisk

Många användningsområden

Kan återanvändas

Mycket mjuk med glesa maskor