



Pehalast®

Elastisk gasbinda

Klassisk gasbinda (klingbinda) för fixering av förband.

Pehalast har en elasticitet på över 65%



Fungerar för alla typer av fixering

Kan användas som sårförband



Indikation

Till alla typer av fixering av förband. Fungerar utmärkt över leder, koniska och runda kroppsdelar. Kan efter sterilisering användas som direkt sårförband t.ex. inom handkirurgi.

Kontraindikationer:

Inga kända.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Pehalast är en elastisk gasbinda av 20-trådig ren bomull med vävda kanter. Utmärkt att använda där förband är svåra att fixera med en oelastisk gasbinda.

Egenskaper

Elasticiteten kommer från kraftigt vridna varptrådar som också ger bindan en kräppad struktur. Tack vare strukturen hakar varje varv av bindan tätt fast i tidigare varv och smiter åt perfekt kring alla kroppsdelar. Pehalast skär inte in i huden eller hindrar blodcirkulationen. Rörelseförmåga i bandagerade leder bibehålls. Pehalast består av rena naturfibrer och har därför god absorptionsförmåga och är mycket hudvänlig.

Material

100% bomull. Vit.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Utsträckt längd: 4 m

Outsträckt längd: ca 2,4 m

Elasticitet: 65%

Tvättråd

Pehalast kan steriliseras i autoklav vid 134°C i 15 minuter och tvättas i 95°C ett fåtal gånger.



Pehalast applicerad som förbandsfixering.

Tips

Pehalast kan steriliseras och användas direkt på såret, som sårforband. Används med fördel vid handkirurgi eftersom förbandet kan formas mycket precist och underlätta för handens rörlighet.

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
Pehalast.	4 m x 4 cm	931 548	20 st	8 Afp
Lösa i förpackning	4 m x 6 cm	931 543	20 st	13 Afp
	4 m x 8 cm	931 544	20 st	10 Afp
	4 m x 10 cm	931 545	20 st	8 Afp
	4 m x 12 cm	931 546	20 st	7 Afp

Fördelar:

Bekväm att bära

Elastisk

Många användningsområden

Kan återanvändas