

# Netti® Combi Aqua

## Skyddsbyxa vid bad

### Resår

Innerbyxans resår i midja och ben är belagd med silikonsträngar för att sluta tätt mot huden.

### Material

Innerbyxans material är lätt och prasselfritt.

### Tätande funktion

Det högelastiska materialet förstärker innerbyxans tätning.

### Vätskeavvisande

Ytterbyxans material absorberar inte någon vätska vilket säkrar mot genomvättning.

### Färgmarkering

Sömmens färg på innerbyxans insida av resåren visar byxans storlek.

Netti Combi Aqua är utvecklad i nära samarbete med vårdpersonal och användare. Produkten bygger på en kombination av två enheter vilket ger stora funktionsfördelar. Innerbyxan används vid behov tillsammans med ett inkontinensskydd. Ytterbyxan, med sitt högelastiska material som inte absorberar vätska, förstärker innerbyxans tätning. Principen med två enheter gör på- och avklädning enkel och smidig för både användare och vårdpersonal.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45  
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)

#### Material:

Innerbyxa: 100 % polyuretan  
Utsidan är belagd med 100 % polyester.

Ytterbyxa: 80 % Tactel micro fiber  
20 % Lycra

Latexfri

#### Tvättanvisning:

Innerbyxa: Max 95°C

Ytterbyxa: Max 60°C

Skölj båda byxorna noga efter bad.

Båda byxorna kan torktumlas (undvik hög temperatur).



#### Mätanvisning:

För att välja rätt storlek är det mycket viktigt att ta mått på användaren.

1. Mät midjans omfång
2. Mät benens omfång högst upp på låret

Utgå från tabellen nedan och välj den byxa som bäst stämmer överens med användarens egna mått. Måtten som anges i tabellen anger byxornas storlek i ej sträckt till utsträckt läge (t ex för stl Barn 1 är innerbyxans midjemått 37 cm i ej sträckt läge och 51 cm i utsträckt läge). Om användarens mått stämmer överens med flera storlekar, välj den mindre. För att undvika läckage är det mycket viktigt att byxorna sluter ordentligt tätt mot huden. Använd ett så litet inkontinensskydd som möjligt och undvik att använda en fixeringsbyxa under badbyxan då den kan hamna mellan huden och innerbyxans resår, vilket kan leda till läckage.

Sortiment	Art.nr.	Innerbyxa		Ytterbyxa		Färgkod	Förp.
		Midjemått	Benomfång	Midjemått	Benomfång		
Barn 1	260 002	37-51 cm	20-28 cm	44-60 cm	20-32 cm	Grön	1 st
Barn 2	260 003	42-56 cm	26-36 cm	48-70 cm	23-36 cm	Röd	1 st
Barn 3	260 004	48-62 cm	32-44 cm	48-70 cm	23-36 cm	Gul/Svart	1 st
Dam 1	260 000	52-85 cm	30-52 cm	50-86 cm	26-54 cm	Gul	1 st
Dam 2	260 005	57-95 cm	35-58 cm	56-96 cm	28-60 cm	Blå	1 st
Dam 3	260 010	62-105 cm	40-64 cm	62-106 cm	32-66 cm	Brun	1 st
Dam 4	260 015	67-110 cm	45-70 cm	66-120 cm	36-80 cm	Grön	1 st
Dam 5	260 020	72-120 cm	50-76 cm	66-120 cm	36-80 cm	Grön/svart	1 st
Herr 1	260 001	52-85 cm	30-52 cm	50-86 cm	26-54 cm	Gul	1 st
Herr 2	260 006	57-95 cm	35-58 cm	56-96 cm	28-60 cm	Blå	1 st
Herr 3	260 011	62-105 cm	40-64 cm	62-106 cm	32-66 cm	Brun	1 st
Herr 4	260 016	67-110 cm	45-70 cm	66-120 cm	36-80 cm	Grön	1 st
Herr 5	260 021	72-120 cm	50-76 cm	66-120 cm	36-80 cm	Grön/svart	1 st

#### Fördelar:

Enkel och lätt på- och avklädning

Materialet är lättskött

Latexfri