

Pütter®Flex

Låglastisk kompressionsbinda med ökad komfort och rörlighet

Kompression är ofta en förutsättning för att ett sår skall kunna läka. Önskar man uppnå en kraftig kompression med högt arbetstryck och ett lågt vilotryck så kan man med fördel använda PütterFlex. Bindan är elastisk på både längd och bredd vilket har många fördelar, foten blir mer rörlig och man slipper "glipan" vid hälen.

Bindan släpper igenom luft vilket gör den bekväm att bära



Kan sitta på i upp till tre dagar

Enkel att applicera och man slipper "glipan" vid hälen

Indikation

Vid alla akuta och kroniska venösa ödem, venösa bensår och tromboflebit. Efter injektionsbehandling av åderbräck.

Kontraindikationer:

Arteriell ocklusionssjukdom.

Bensår med arteriellt ursprung.

Används ej till sängliggande och rullstolsburna patienter. Endast till uppgående patienter eftersom det krävs muskelarbete för att förbättra det venösa återflödet och för att lindningen ska ha effekt.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

PütterFlex ger en kraftig kompression med högt arbetstryck och lågt vilotryck.

Egenskaper

Den flexibla vävstrukturen gör det möjligt att lägga en varaktig kompression. Eftersom en kortsträcksbinda dessutom anpassar sig efter benomfånget, kan man med fördel låta bindan sitta kvar i upp till 3 dagar även om ödemet eller svullnaden lägger sig. Skulle man däremot ha en extra kraftig svullnad finns det risk att bindan glider ner om svullanden reduceras drastiskt. Bindan har stretch åt båda hållen vilket ökar både rörligheten och komforten för användaren.

Material

100% bomull. Bindan är helt latexfri.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt ,klass 1, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Elasticitet längd: 90%

Elasticitet bredd: 40%

Tvättråd

PütterFlex kan tvättas i 95°C och steriliseras i autoklave vid 134°C.



Då ankelleden får en ökad rörlighet, ger det användaren möjlighet att fungera obehindrat i vardagen.

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
Pütter.Flex	5m x 6cm	931 827	1 st	40 Afp
Styckförpackad i ask	5m x 8cm	931 828	1 st	40 Afp
	5m x 10cm	931 829	1 st	40 Afp
	5m x 12cm	931 830	1 st	60 Afp
Lösa i ask	5m x 6cm	931 831	10 st	8 Afp
	5m x 8cm	931 832	10 st	8 Afp
	5m x 10cm	931 833	10 st	8 Afp
	5m x 12cm	931 834	10 st	8 Afp

Fördelar:

Hög användarkomfort

Flexibel vid applicering

Släpper igenom luft

Latexfri