

# Pütterbinde E®

## Lågelastisk kompressionsbinda

Kompression är många gånger en förutsättning för att ett sår skall läka. Pütterbinde E är en lågelastisk kompressionsbinda som kan användas när det krävs högt arbetstryck och lågt vilotryck. Bindan är enkel att fixera och kan sitta på plats i upp till tre dagar.

Enkel fixering



Kan tvättas i 40°C

Fungerar oberoende av vilken lindningsteknik du vill använda

### Indikation

Vid alla akuta och kroniska venösa ödem, venösa bensår och tromboflebit. Efter injektionsbehandling av åderbräck.

#### Kontraindikationer:

Arteriell ocklusionssjukdom.  
Bensår med arteriellt ursprung.  
Används ej till sängliggande och rullstolsburna patienter. Endast till uppegående patienter eftersom det krävs muskelarbete för att förbättra det venösa återflödet och för att lindningen ska ha effekt.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45  
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)

Pütterbinde E ger en kraftig kompression med högt arbetstryck och lågt vilotryck.

### Egenskaper

Pütterbinde E har en kort sträckbarhet vilket innebär att man kan lägga en varaktig kompression i upp till tre dagar eftersom bindan anpassar sig även när svullnaden går ner. För att uppnå bäst effekt bör man polstra innan lindning. Det är viktigt att försöka röra på fötterna även om patienten är stillasittande.

### Material

100% bomull.

Bindan är hudfärgad.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Bindan är helt latexfri.

Elasticitet: 90%

### Tvättråd

Pütterbinde E kan tvättas några få gånger i 40°C och steriliseras i autoklav vid 134°C. För att göra bindans livslängd så lång som möjligt ska den torkas plant efter tvätt och lindas hårt när den inte används.



Bästa tiden att linda är på morgonen.

Obs! Använd inte förbandsklämman runt produkten för att fixera bindan på patienten, den finns endast med i förpackningen för att hålla ihop bindan under transporten.

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
<b>Pütterbinde E.</b>	5 m x 6 cm	931 820	10 st	8 Afp
lösa i ask	5 m x 8 cm	931 821	10 st	8 Afp
	5 m x 10 cm	931 822	10 st	8 Afp
	5 m x 12 cm	931 823	10 st	8 Afp

### Fördelar:

God hållbarhet

Släpper igenom luft

Latexfri