

Rolta®/Rolta® soft

Syntetisk polstervadd

Kompression är många gånger en förutsättning för att ett sår ska läka. För att ge en jämn kompression krävs ofta en väl utförd polstring under kompressionsbindan. Anledningen är att exempelvis ett ben har olika form och kan behöva "fyllas ut" för att trycket ska fördela sig jämt. Som utfyllnad används med fördel polstervadd. Rolta och Rolta soft är två varianter av syntetisk polstervadd. De är tillverkade i samma material men sammansatta på olika sätt. Detta gör att Rolta soft upplevs som mjukare och fluffigare.

Mjuk och följsam



Enkel att hantera

Lätt att riva av



Indikation

För polstring under kompressionsbindor och gips.

Kontraindikationer:

Inga kända.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Rolta och Rolta soft är två varianter av syntetisk polstervadd.

Egenskaper

Rolta soft tar mindre utrymme än Rolta och appliceras lätt i mindre försänkningar och hålrum. Rolta och Rolta soft absorberar inte röntgenstrålar och behöver därför inte avlägsnas före röntgenundersökningar. Rolta och Rolta soft är genomsläppliga för luft och fukt. Bindorna kan appliceras både på längden och tvären allt efter behov. Polstervadden rivs lätt av när önskad längd använts. Rolta och Rolta soft är inte absorberande produkter. Rolta och Rolta soft har en hög polstrande effekt och appliceras utan hjälpmedel.

Material

100% polyester. Rolta är sammansatt med hjälp av en akrylatmassa medan Rolta Soft är sammansatt på maskinell väg.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Rolta finns även i sterilt utförande. Observera att produkten då är 2-steps sterilförpackad.

Polstervadden kan steriliseras i autoklav vid 121°C i 20 minuter.



Rolta appliceras för utfyllnad.

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
Rolta	3 m x 6 cm	325 153	50 st	1 Afp
Osteril, förpackad i ask	3 m x 10 cm	325 155	50 st	1 Afp
	3 m x 15 cm	325 157	50 st	1 Afp
	3 m x 25 cm	325 159	25 st	1 Afp
	3 m x 6 cm	325 123	6 st	8 Afp
	3 m x 10 cm	325 125	6 st	6 Afp
	3 m x 15 cm	325 127	4 st	6 Afp
2-steps steril, styckpackad	3 m x 10 cm	455 213	60 st	1 Afp
Rolta soft	3 m x 6 cm	932 048	50 st	1 Afp
Osteril, förpackad i ask	3 m x 10 cm	932 049	30 st	1 Afp
	3 m x 15 cm	932 050	20 st	1 Afp
	3 m x 25 cm	932 051	10 st	1 Afp
	3 m x 6 cm	932 043	6 st	8 Afp
	3 m x 10 cm	932 045	6 st	6 Afp
	3 m x 15 cm	932 047	4 st	6 Afp

Fördelar:

Mjuk och följsam

Två kvaliteter att välja på

Flera olika förpackningsstorlekar

Lätt att riva

Behöver inte avlägsnas vid röntgenundersökning