

# Sorbalgon®/Sorbalgon® T

## Förband av kalciumalginatfibrer

Sorbalgon är ett kalciumalginatförband med hög absorptionskapacitet. När Sorbalgon kommer i kontakt med salterna i exsudat och blod bildas en gel som hjälper till att skydda såret och innesluter både överflödigt exsudat samt bakterier. Gelen har även en återfuktande effekt vilket ger en bättre läkningsmiljö. Det är viktigt med en bra exsudathantering, då det både kan orsaka skador på huden runt såret samt motverka läkningsprocessen om denna fas blir för lång.

Hög absorptionsförmåga



Blodstillande



Sorbalgon T,  
tamponeringsremsa



### Indikation

Alla typer av sår med sekretion, akuta såväl som svårläkta. Exempelvis tagställen, näsblod, nagelextraktioner, abscesser, bensår och trycksår men även sår inom olycksfalls- och tumörkirurgi.

#### Kontraindikationer:

Inga kända. Bör dock inte användas i torra sår eller sår med liten sekretion.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45  
E-post [info@hartmann.se](mailto:info@hartmann.se)

Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)

Sorbalgon är en kalciumalginatfiberförband som används i våtskande sår.

### Egenskaper

Sorbalgon har en mycket hög absorptionskapacitet, ca 20 gånger sin egen vikt. När Sorbalgon kommer i kontakt med salterna i sårexsudat och blod bildar den en gel. I gelen innesluts även bakterier som hindras från att angripa såret, på så vis skapas en bättre läkningsmiljö. Gelen gör också att produkten inte fastnar i såret. Skulle trots allt någon rest finnas kvar av förbandet resorberas denna av kroppen.

Sorbalgons gelaktiga konsistens har samma effekt som ett fuktigt förband, det förhindrar uttorkning av såret. Genom att såret hålls fuktigt underlättas läkningsprocessen. Sorbalgon finns som kvadratiska kompresser i flera storlekar. För djupa sår finns Sorbalgon även som tamponeringsremsor, då med tillägget T efter namnet.


### Material

99% kalciumalginat och 1% polysorbat. Sorbalgon är utan tillsats av verksamma ämnen.

### Tips

När Sorbalgon används i djupa sårhål ska de fyllas luftigt eftersom alginatfibrerna expanderar när de absorberar exsudat ur såret. Packas fibrerna för hårt riskerar de att orsaka smärta och skada då de pressar mot sårets kanter.

Sorbalgon kan fixeras med filmförband, hydrocolloider eller absorptionsförband.

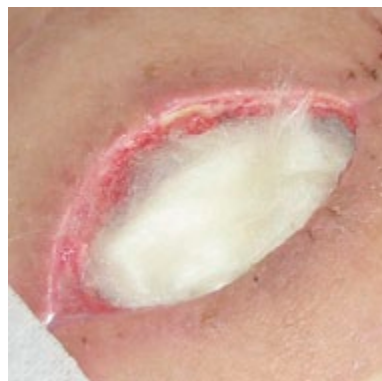

Sorbalgon luftigt packat i en sårhåla.

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
<b>Sorbalgon</b>	10 x 10 cm	999 595	10 st	10 Afp
Steril, enstycksförpackad	10 x 20 cm	999 589	5 st	14 Afp
<b>Sorbalgon T</b>	1g, 30 cm	999 590	3 st	16 Afp
Steril, enstycksförpackad	2g, 30 cm	999 592	5 st	10 Afp

### Fördelar:

Hög absorptionskapacitet

Blodstillande

Enkel hantering

Mjuk, patientkomfort

Ekonomisk

Skyddar såret