



TenderWet® 24 active/TenderWet® active cavity

Upprensande förband

För att få igång läkningsprocessen i ett svårt kontaminerat sår kan alternativ till kirurgisk debridering vara bra att ha till hands. TenderWet active är ett aktivt såruppsnande förband med en fuktig sårdyna som innehåller superabsorberande polymerer (SAP) samt Ringer-lösning som spolar rent såret samtidigt som SAP:n i sårdynan absorberar och kapslar in sårsekret, t.ex. nekrotisk vävnad och MMP (metalloproteaser).

På så vis förs material som kan hämma sår läkningen och orsaka sekundärinfektioner bort.

TenderWet active finns i två olika utföranden, TenderWet 24 active som har en vattenavvisande folie på ena sidan och TenderWet active cavity som saknar folie.

Skonsam uppsnäsning av kontaminerade sår

Kan användas under kompression upp till 35 mmHg



Transporterar bort och kapslar in sårsekret



Indikation

Uppsning av t.ex. bensår, diabetessår eller trycksår. Löser upp och avlägsnar nekrotisk vävnad och fibrinbeläggningar. Sår med dålig läkningsförmåga. Sår med hög exsudatmängd. Kan även användas på infekterade sår.

Kontraindikationer:

Inga kända.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

TenderWet är ett aktivt såruppremsande förband.

Egenskaper

TenderWet active är en sterilförpackad kompress, aktiverad med Ringer-lösning och färdig att använda. Kompressen avger Ringer-lösning in i såret samtidigt som sårdynan absorberar sårsekret, på så sätt sker kontinuerlig spolning av såret. TenderWet active 24 kan sitta på plats i 24 timmar. Den grönrandiga ovansidan som innehåller en vattenavvisande folie, bevarar sårets fuktighet samtidigt som den skyddar mot kontaminering utifrån. TenderWet active cavity är avsedd för djupare sår och kan med fördel användas som tamponad med TenderWet active 24 som sekundärt förband. Även TenderWet active cavity byts dagligen.

Material

Ytskikt av specialstickad väv av polypropen-fibrer med innehåll av superabsorbent, polyacrylat, cellulosa och polypropen-fibrer aktiverad med Ringer-lösning. TenderWet 24 active har dessutom en skyddsfolie av polypropen och gröna PP-trådar på ovansidan. Ringer-lösning består av natriumklorid, kalciumklorid och kaliumklorid. (NaCl, CaCl₂ x 2H₂O, KCl)

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass IIb, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC



TenderWet active 24.

Särskilda upplysningar

TenderWet active får inte klippas eller på annat sätt skadas mekaniskt.

Hydroaktiv sårbehandling med Ringer-lösning leder inte till maceration av friska hudceller men kan få förhårdnader att svälla, vilket visar sig som vit beläggning. Sårkanterna kan med fördel vårdas med en fet salva. Såret blir normalt större i omfång innan all död vävnad är avlägsnad och läkningen startar.

TenderWet active får inte förvaras över 25°C.

Tips!

Fixera enkelt med exempelvis Peha-haft Latexfri fixeringsbinda för att undvika vidhäftning mot redan skör hud. För att kännas bekvämare för patienten kan kompressen läggas öppen på en varm plats t.ex. i ljummet vatten, så att den når kroppstemperatur.

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
TenderWet® 24 active	Ø 4 cm	609 210	10 st	6 Afp
Steril, enstycksförpackad	Ø 5,5 cm	609 211	10 st	6 Afp
	4 x 7 cm oval	609 212	10 st	6 Afp
	7,5 x 7,5 cm	609 213	10 st	6 Afp
	10 x 10 cm	609 214	10 st	6 Afp
TenderWet® active cavity	Ø 4 cm	609 271	10 st	6 Afp
Steril, enstycksförpackad	Ø 5,5 cm	609 272	10 st	6 Afp
	4 x 7 cm oval	609 273	10 st	6 Afp
	7,5 x 7,5 cm	609 274	10 st	6 Afp
	10 x 10 cm	609 275	10 st	6 Afp

Fördelar:

Skonsam debridering

Enkel hantering

Hämmer sekundärinfektioner

Kan användas i hemsjukvård

Hälsoekonomisk

Hämmer för stor mängd MMP