

Veno[®] 4

Fyralagers kompressionssystem

Kompression är många gånger en förutsättning för att ett sår ska läka. Veno 4 innehåller allt som behövs för en bra kompressionsbehandling, allt i samma förpackning och klart att använda.

Helt latexfritt



Allt på plats

Lindningsinstruktion i
alla förpackningar

Indikation

För behandling av venösa bensår och relaterade tillstånd.

Kontraindikationer:

Patienter med arm/ankeltrycksindex (AAI) lägre än 0,8. (Kontrollera trycket vid varje förbandsläggning allt eftersom ödemet reduceras). Arteriell insufficiens. Ska inte användas på patienter med diabetes eller nedsatt hjärtfunktion.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Veno 4 är ett latexfritt fyrlayers kompressionssystem som passar för de flesta patienter med venösa bensår där ankelomfånget är mellan 18-25 cm. Systemet består av fyra latexfria bindor.

Egenskaper

Det första lagret, en polsterbinda, används för att forma benet till en jämn form för att undvika att skapa tryckpunkter. Det andra lagret består av en kräppbinda av bomull som används till att fästa polsterlagret. Den tredje lågelastiska kompressionsbindan ger ett tryck på ca 17 mmHg. Det fjärde lagret, den kohesiva bindan, bidrar till kompressions-effekten och håller förbandet på plats i upp till sju dagar. När den appliceras med måttlig sträckning och ca 50% överlappning ger hela förbandet ett tryck på ca 23 mmHg. Veno 4 kan användas tillsammans med sårforband. Vid korrekt applicering kan Veno 4 ge kompression i upp till sju dagar.

Material

Polstervadd av 100% viskos, kräppbandage av bomull, viskos och polyamid. Kompressionsbinda av viskos, polyamid, elastan och bomull. Kohesiv binda av polyester och elastan. Samtliga material är latexfria.

Alla bindor i förpackningen är osterila, lager 1-3 kan vid behov steriliseras i autoklav vid 121°C i 20 minuter.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.



Sortiment	Art.nr	Innehåll per påse	Storlek	Afp	Tfp
Veno 4	931 680			5 set	30 Afp
4 bindor i zip-påse.		1 st Polsterbinda	3,5 m x 10 cm		
		1 st Kräppbinda	4,5 m x 10 cm		
		1 st Kompressionsbinda	8,7 m x 10 cm		
		1 st Kohesiv stödbinda	6 m x 10 cm		

Fördelar:

- Allt som behövs finns på plats
- Lång användningstid
- Lindningsinstruktion i varje påse
- Latexfri