



# Zetuvit® E

## Absorptionsförband

Zetuvit E är ett absorptionsförband avsett för måttligt till rikligt vätskande sår. Förbandet består av fyra olika materialskikt, som kompletterar varandra optimalt och som ger förbandet dess goda egenskaper.

God absorptionsförmåga

Enkel hantering

Mjuk, polstrande



### Indikation

Alla ytliga, måttligt till kraftigt vätskande sår, såsom kirurgiska sår och venösa bensår. I djupa sår är kombination med t.ex. Sorbalgon möjlig. Infekterade sår och sår som riskerar att bli infekterade kombineras med Atrauman Ag.

#### Kontraindikationer:

Zetuvit E ska inte användas på torra sår, friliggande ben, muskler eller senor.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45  
E-post [info@hartmann.se](mailto:info@hartmann.se)

Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)

Zetuvit E är ett absorptionsförband med hög absorptionskapacitet.

### Egenskaper

Förbandet har en hög absorptionskapacitet och suger upp exsudat snabbt. Förbandet är enkelt att kombinera med andra typer av förband såsom salvkompresser eller kalciumalginater.

### Material

Zetuvit E är ett fyrlayers förband. Den absorberande kärnan består av cellulosaflopp och är innesluten i en tunn non-wovenväv av cellulosa som fördelar vätskan jämt över förbandet. Den blå baksidan av non-woven polypropen står emot väta men är inte ocklusiv utan genomsläpplig för luft. Detta förhindrar att exsudatet bildar klumpar i förbandet. Framsidan består av hydrofil non-woven polypropen som gör att förbandet inte fastnar i såret.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I. CE-märkt enligt EU-direktive 93/42/EEC.



Fyrlayers förband.

### Fixering

Zetuvit E kan fixeras med bindor, tejper, tubgaser eller fixeringsnät allt enligt behov och sårets placering.

### Tips

Den blå baksidan ska vara vänd uppåt, från såret. Vid kroniska sår rekommenderas att följa upp med ett hydroaktivt förband som t.ex. PermaFoam när exsudatmängden minskar.

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
<b>Zetuvit. E</b>	10 x 10 cm	413 770	25 st	10 Afp
Steril, enstycksförpackad	10 x 20 cm	413 771	25 st	10 Afp
	15 x 20 cm	413 772	25 st	6 Afp
	15 x 25 cm	413 773	10 st	10 Afp
	20 x 25 cm	413 775	15 st	6 Afp
	20 x 40 cm	413 776	10 st	6 Afp
Höggradigt ren, i påse	10 x 10 cm	413 798	10 st	100 Afp
	10 x 20 cm	413 799	10 st	60 Afp
	15 x 25 cm	413 777	5 st	60 Afp
	20 x 25 cm	413 778	5 st	40 Afp

## Fördelar:

Hög absorptionskapacitet

Enkel hantering

Mjuk, patientkomfort

Ekonomisk

Skyddar såret

Många storlekar

Både som steril och höggradigt ren