




Zetuvit® plus

Absorptionsförband med superabsorbenter

En viktig del av sårhäkningsprocessen är exsudationsfasen. Problem uppstår om denna fas blir för lång och exsudatet som från början påskyndade sårhäkningsprocessen börjar ge motsatt effekt och orsakar skador på huden runt såret och motverkar läkningsprocessen. En bra exsudathandling säkerställer att överskottet av exsudat leds bort från såret. Det är också viktigt att förbandsbyten inte blir för täta och stör sårhäkningsprocessen, då detta kan leda till en förnyad bakteriekontaminering. Zetuvit plus har en effektiv polstrand-effekt. Det mjuka non-woven materialet på utsidan och de mjuka kanterna gör att såret och omgivande områden inte irriteras.

Hög absorptionskapacitet

Enkel hantering

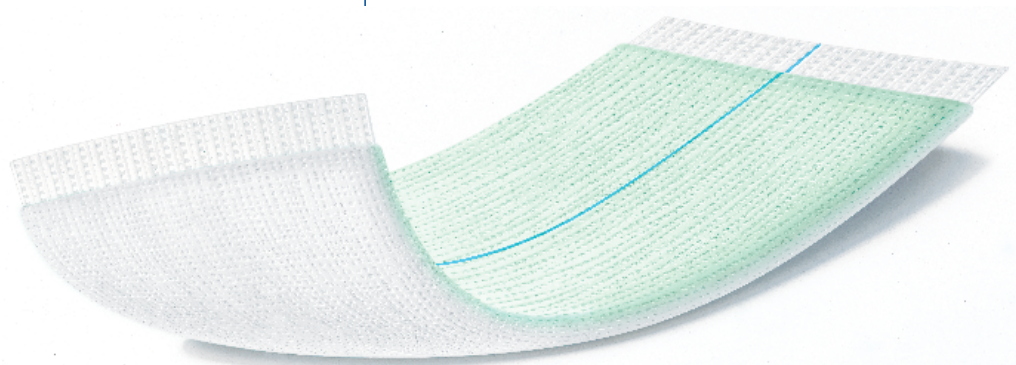

Hög patientkomfort



Indikation

Alla ytliga, kraftigt vätskande sår, såsom kirurgiska sår, dekubitus, venösa bensår exulcererande tumörer och sår orsakade av t.ex. lymfproblem. I djupa sår är kombination med t.ex. Sorbalgon möjlig.

Infekterade sår och sår som riskerar att bli infekterade kombineras med Atrauman Ag.

Kontraindikationer:

Zetuvit plus ska inte användas på torra sår, friliggande ben, muskler eller senor.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Zetuvit plus är ett absorptionsförband med hög absorptionskapacitet.

Egenskaper

Zetuvit plus innehåller superabsorbenter, speciellt framtaget för kraftigt vätskande sår. Förbandet har en hög absorptionskapacitet och suger upp exsudat snabbt. Zetuvit plus absorberar ca 3 gånger så mycket som ett skumförband.

Förbandet är enkelt att kombinera med andra typer av förband som salvkompresser eller kalciumalginater. Zetuvit plus absorberar snabbt och kapslar in stora mängder exsudat.

Material

Zetuvit plus är ett fyrlagers förband. Den absorberande kärnan består av en blandning av superabsorberande polymerer (SAP) och cellulosafluff och är innesluten i en tunn non-wovenväv (cellulosa) som fördelar vätskan jämnt över förbandet.

Den gröna baksidan av non-woven (polypropen) står emot väta men är inte ocklusiv utan genomsläpplig för luft, detta förhindrar att exsudatet bildar klumpar i förbandet.

Hela produkten är innesluten i ett mjukt tvålayers non-woven material. Den yttre ytan på materialet är en hydrofob non-woven (polyamid/viskos) som förhindrar att förbandet fastnar i såret medan den inre är hydrofil och transporterar exsudat till kärnan.


Tips

Vid kroniska sår rekommenderas att följa upp med ett hydroaktivt förband som t.ex. PermaFoam när exsudatmängden minskar.

I djupa sår kan Zetuvit plus kombineras med Sorbalgon och PermaFoam cavity.



Zetuvit plus är ett fyrlagers förband.

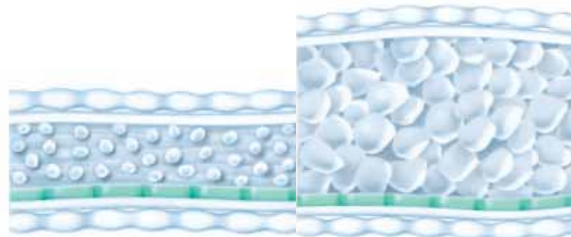

Superabsorbenterna kapslar in den absorberade vätskan och ökar därför i omfång.

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
Zetuvit[®] plus	10 x 10 cm	413 710	10 st	8 Afp
Steril, enstycksförpackad	10 x 20 cm	413 711	10 st	6 Afp
	15 x 20 cm	413 712	10 st	8 Afp
	20 x 25 cm	413 713	10 st	6 Afp
	20 x 40 cm	413 714	5 st	8 Afp

Fördelar:

Hög absorptionskapacitet

Snabb absorption

Enkel hantering, sparar tid

Ekonomisk, färre byten

Skyddar såret, mjukt, polstrande